

להפעלה/כיבוי המערכת, יש לחבר/לנתק את הסוללה מהמעבד



נורית החיווי (LED)

צבע	פעולה	משמעות
ירוק	הבהוב בזמן ההפעלה לאחר חיווי מצב הסוללה או בלחיצה ממושכת על הלחצן הרב שימושי	חיווי על התכניות: 1 הבהוב ממושך = תכנית אוטומטית 1 הבהוב קצר = תכנית מס' 1 2 הבהובים קצרים = תכנית מס' 2 וכך הלאה
	הבהוב בתגובה לקולות חזקים	תגובה תקינה של המיקרופונים לקולות חזקים מעיד על מעבד תקין
	3 הבהובים בעת החיבור לתוכנת המיפוי או לאפליקצייה בנייד*	זיהוי המעבד
סגול	הבהוב אחד	שינוי רמת עוצמה, במידה והפונקציה הופעלה בתוכנת המיפוי
כחול	הבהובים כחולים בזמן הזרמת אודיו/מדיה	קליטת מידע מוזרם
כתום	הבהוב אחד ארוך בעת ההפעלה לאחר חיווי מצב סוללה ותוכניות*	מצב טיסה
	הבהוב בעת ההפעלה*	חיווי מצב סוללה: 1 הבהוב > 20% 2 הבהובים 20-49% 3 הבהובים 50-84% 4 הבהובים +85%
	הבהוב בעת ההפעלה	סוללה חלשה
אדום	אדום קבוע*	שגיאה/בעיה בהפעלה
	הבהוב מהיר (יותר מאחד לשניה)*	המעבד מחובר לשלל הלא נכון
	הבהוב אחד לשניה לאחר ההפעלה	אין תקשורת בין המעבד לשלל



* פונקציות שאינן ניתנות לביטול בתוכנה

שימו לב:

- המעבד תמיד יידלק בתוכנית שהוגדרה כתוכנית Start UP בתוכנת המיפוי.
- אם הקלינאי הגדיר רמות עולות בעוצמה לצורך הסתגלות לשלל, המעבד יופעל על הרמה האחרונה שנבחרה.
- ההבהובים הכתומים בעת הפעלת המעבד לא מופיעים כאשר משתמשים בסוללות חד-פעמיות.

הלחצן הרב-שימושי

אם מרכז ההשתלות ניטרל את השימוש בכל/חלק מהפונקציות של הלחצן הרב-שימושי, תוכלו לשלוט במעבד באמצעות אפליקציית **AB Remote**.

מצב האזנה	לחיצה קצרה (פחות מ-2 שניות)	לחיצה ארוכה (מעל 2 שניות)
האזנה סטנדרטית	הגברה או הנמכה של עוצמת הווליום	שינוי תוכנית
בזמן הזרמת אודיו	הגברה או הנמכה של עוצמת הצליל המוזרם	שינוי תוכנית
בזמן שיחת טלפון	קבלת השיחה (בזמן הצלצול) או הגברה/הנמכה של עוצמת הווליום (בזמן השיחה)	דחיית שיחה (בזמן הצלצול) או ניתוק השיחה (בזמן השיחה)



אפליקציית AB Remote

3

תקינות מיקרופון* עם השתל** סוללה תקשורת מצב

100%

השמע צפוף

הבהוב נורית

0 רמה מתקדמת

בחירת רמת עוצמת שמע (0-4)***

2

לחצו יחס בין הסביבה להזרמה דרך Bluetooth או רוג'ר

1

תפריט ראשי

תפריט תוכניות

מצב סוללה

מחווני לכיוון עוצמת הקול

פיצול = ככל מכשיר בנפרד

צירוף = בשניהם בו-זמנית

* תקינות מיקרופון - במצב תקין יופיעו מלבנים כחולים בתגובה לקולות.
 ** מנעול אפור פתוח = אין תקשורת. מנעול כחול סגור = תקשורת תקינה.
 *** בחירת עוצמת שמע - אפשרות זו פעילה רק אם הוגדרה ע"י מרכז ההשתלה.

בדיקת תקינות המכשיר באמצעות האפליקציה:

- 1 לחצו על גלגל "תפריט ראשי" בפינה השמאלית העליונה של המסך.
- 2 בחרו ב-"בדיקת מכשיר".
- 3 במסך "בדיקת מכשיר" < בצעו בדיקת תקינות של המכשיר.

M Listening Check

אביזר המאפשר להאזין באופן סדיר לאיכות הקול הנקלטת באמצעות המיקרופונים השונים של המעבד (כגון: טי-טי, מיק, מיקרופון יחידת הראש) או באמצעות מקורות אחרים (כגון: FM/Roger) עבור כל תוכנית בנפרד.

